

Opbevaring af modermælk

Modermælk skal forsegles og opbevares i køleskabet for langtidsopbevaring.

Opbevaringsmetode	Opbevaringstemperatur	Længste opbevaringstid
Rum	19°C-26°C	4-6 timer
Køleskab	<4°C	3-8 dage
	-15°C	14 dage
Fryser	-18°C	3-6 måneder
	-20°C	3-6 måneder

Opvarmning af mælk

1. For at bevare næringsstofferne i modermælken kan du opvarme den med 40°C varmt vand eller bruge en flaskevarmer.
2. Optø ikke frosset modermælk i mikroølgeovnen eller kogende vand (det vil ødelægge næringsstofferne i modermælken).

Steriliserings instruktion

Komponenter	Steriliserings instruktion
Membrandæksel, Håndtag, Flaskelåg, Pumpedel, Flaskedæksel, Stempel, Flaskeadapter, Flaske, Flaskestativ, Flangeafdækning	Disse er lavet af plastik og kan skylles eller vaskes i opvaskemaskine (temperaturen må ikke overstige 100°C). Efter rengøring kan du desinficere dem med dampsterilisator, ultraviolet sterilisator, mikroølgeovn (læg venligst desinficerede dele i en desinfektionsbeholder eller en desinfektionspose), eller kogende vand (mængden af vand må ikke være lavere end de desinficerede dele, og de desinficerede dele må ikke røre bunden af gryden eller metalkanterne direkte).
Membran, Flange, Ventil, Tætningsring, Sut	Disse er lavet af silikone og er skrøbelige. Skyl dem forsigtigt ved rengøring. De er ikke egnede til gnidning og langvarig højtemperaturdesinfektion. Ellers kan det forårsage hurtig aldring eller deformation, hvilket vil påvirke brugen.

Vær opmærksom på

1. Læs manualen omhyggeligt før brug.
2. Dette produkt er personligt, del den ikke med andre.
3. Vær forsigtig, når du installerer eller rengør komponenter.
4. Opbevar produktet uden for børns rækkevidde.
5. Følg steriliseringsinstruktionerne for at rengøre produktet.
6. Producenten er ikke ansvarlig for skader på grund af forkert brug.

Fejlfinding

Mangel på sugning

Kontrollere, om alle komponenter er installeret korrekt, især ventilen. Kontrollere også ventilen for at se, om den er beskadiget.

Kan ikke samle modermælk

Kontrollere, om pumpen har sugning. Slap af i kroppen og prøv igen. Sørg for, at brysterne ikke er blokerede.

Modermælk går ikke i flasken

Placere flangen tæt på brystet, sørg for, at der ikke er nogen mellemrum. Læn dig lidt fremad, når du pumper.

Komponenter er farvet

Følg steriliseringsinstruktionerne for at rengøre alle komponenter. Opbevar ikke mad og brystpumpe sammen.

Produkt specification

Navn	Manuel brystpumpe		
Mængde	1 stk	Model	XB-8610
Garanti Tid	2 years (in denmark)	Oprindelsessted	Kina

opsy

byMOXO ApS


Adresse: Eksportvej 7-9, 8870 Langaa, CVR 36728035

Læs venligst manualen omhyggeligt før brug.
Opbevar produktet uden for børns rækkevidde.

opsy

Manuel brystpumpe

— Brugervejledning —

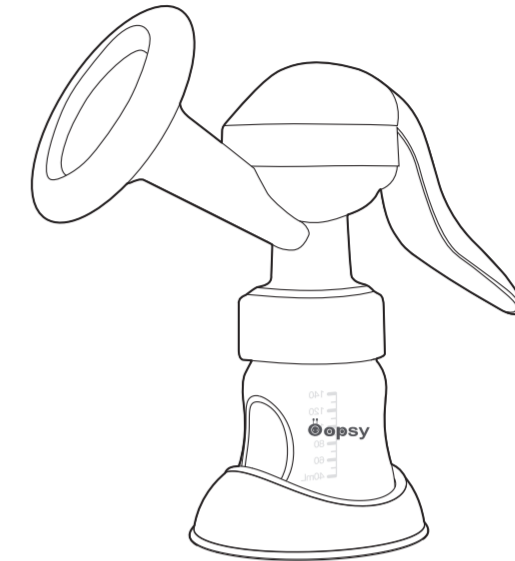

Anti tilbagestrømnings design · Sikkert materiale BPA-fri ·
Silikone Massage flange · to gear til sugejustering

komponenter



Komponent navn	Materialer	Driftstemperatur	Mængde
Ⓐ Membrandæksel	PP	-20°C-120°C	1
Ⓑ Membran	Silikone	-20°C-200°C	1
Ⓒ Håndtag	PP	-20°C-120°C	1
Ⓓ Stempel	PP	-20°C-120°C	2
Ⓔ Pumpedel	PP	-20°C-120°C	1
Ⓕ Flangeafdækning	PP	-20°C-120°C	1
Ⓖ Flange	Silikone	-20°C-200°C	1
Ⓗ Tætningsring	Silikone	-20°C-200°C	1
Ⓙ Ventil	Silikone	-20°C-200°C	2
Ⓚ Flaske	PP	-20°C-120°C	1
Ⓛ Flaskestativ	PP	-20°C-120°C	1
Ⓜ Flaskelåg	PP	-20°C-120°C	1
Ⓝ Sut	Silikone	-20°C-200°C	1
Ⓟ Flaskedæksel	PP	-20°C-120°C	1
Ⓠ Flaskeadapter	PP	-20°C-120°C	1
Instruktioner	/	/	1

Rengør og desinficere de dele, der bruges til fødevarer kontakt før og efter hver brug.

* Billedet er kun til reference, produktet kan ændres.


Advarsel:
Hvis nogen af komponenterne er beskadigede eller mangler, Kontakt venligst forhandlerens kundeservice for hjælp.

Samling af brystpumpen

Vask dine hænder før samling af pumpen. Rengør brystpumpen før og efter hver brug (se steriliserings afsnittet).



1. Skub stemplet ind i membranen.

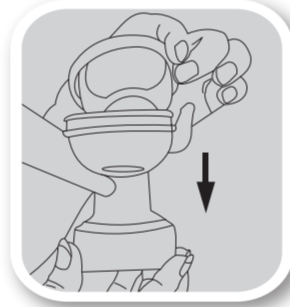

2. Forbind membranen til pumpedelen.



3. Skub håndtages rille under stemplet, tryk på håndtaget indtil du hører et klik.



4. Skub silikoneindsatsen på pumpedelen, sørg for, at de passer tæt sammen.



5. Fastgøre ventilen til pumpehuset.




6. Skrue flasken på pumpehuset.

Brug

1. Sørg for, at alle dele af brystpumpen er steriliseret og følg instruktionerne for korrekt installation før brug. Vask dine hænder og brug et varmt vådt håndklæde til at massere dit bryst før pumpning. Efter massagen, sid oprejst og læn dig lidt fremad. (Du skal ikke ligge ned, og ikke lægge brystpumpe på skrå, lad midten af flangen justere brystvorten og klæbe til brystet for at sikre, at der ikke kommer luft ind. Tryk på håndtaget, indtil brystet føles under pres.

2. Tryk let og hurtigt på håndtaget for at stimulere babyens sugning. Tryk ikke håndtaget helt ned, slip det når det er halvt trykket.

3. Når modermælken begynder at komme ud, sænk trykhastigheden til 1-2 sekunders interval.

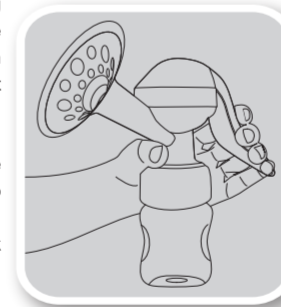

Justering af sugekraft



Første gear: blid tryk.



Anden gear: kraftigt tryk.

Tips til brug af manuel brystpumpe

1. Sørg for, at brystpumpen er rengjort og samlet korrekt.
2. Hold dine hænder og bryster rene. Sid behageligt og forbered dig på at pumpe modermælk.
3. Placere brystet i midten af silikoneflangen. Hold flangen helt tæt omkring brystet.
4. Tryk og slip for at skabe tryk og begynd at pumpe.
5. Skift sugeniveau ved at justere stemplet og håndtaget.
6. Dæk flaskelåget efter pumpning. Sæt det i køleskabet, hvis det er nødvendigt. Tjek afsnittet om opbevaring af modermælk.

★ Når du pumper, skal du sidde oprejst. Læg dig ikke på siden, så undgår du tilbagestrømning af mælk.

